


Version från januari 2025

Låsa inställningar för användaren

Buttons Dwell Locked (alt + k)

Tryck på knappen för "Click with Mouse" ungefär mitt i
fönstret. (*Funkar endast genom att klicka med mus eller
trycka på skärmen*). _____

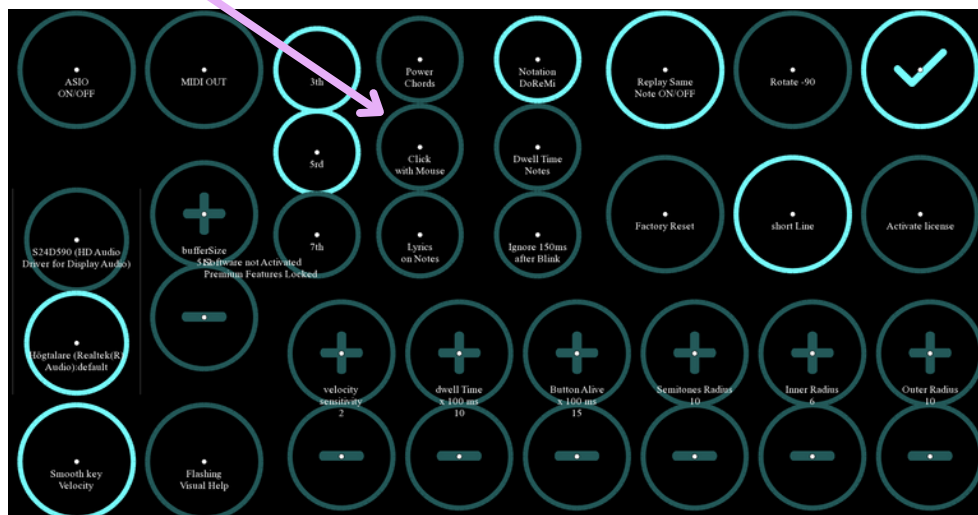

Avancerat alternativ: Det finns möjlighet att endast låsa vissa knappar i Eyeharp. Då krävs tangentbord. Du håller nere alt-tangenten samtidigt som du klickar på den knapp som ska låsas. För att låsa upp en knapp håller du nere alt-tangenten och klickar på knappen igen.



Byta instrument

När Eyeharp har startat så kan du byta instrument genom att trycka på följande knapp:



När du har bytt instrument, så kommer det instrument du har valt att visas på knappen.

Helskärmsläget

För att komma till helskärmsläget så trycker du återigen på instrumentknappen:



Därefter trycker du på knappen fullscreen:



För att avaktivera helskärmsläget så trycker du en gång till på knappen. (Du behöver inte bry dig om att det står "Buttons Dwell Locked (alt + k)" det betyder bara att knapparna är låsta för ögonstyrningen).

Mute-funktionen

När du vill att Eyeharp ska sluta låta så använder du mute-funktionen. Den hittar du här:

För att aktivera mute-funktionen så trycker du på knappen till vänster.



Pausfunktionen

Normalt sett när ögonstyrningens pausfunktion används så kan ögonstyrningsanvändaren inte aktivera något på skärmen, men när det gäller Eyeharp så kommer användaren att kunna spela trots att pausfunktionen är aktiverad. För att pausa Eyeharp måste istället mute-funktionen användas.




Inställningsknappen


Så här ser inställningsknappen ut:




Här hittar du
inställningsknappen:

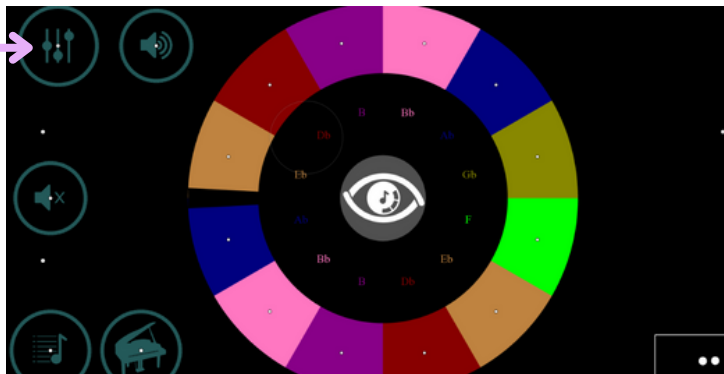

När du trycker på
inställningsknappen så kommer
två menyer fram. Det kommer att
se ut så här:

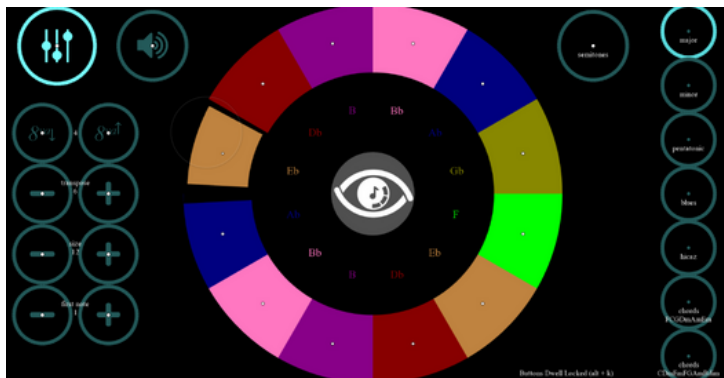

Den vänstra menyn ser ut så här:

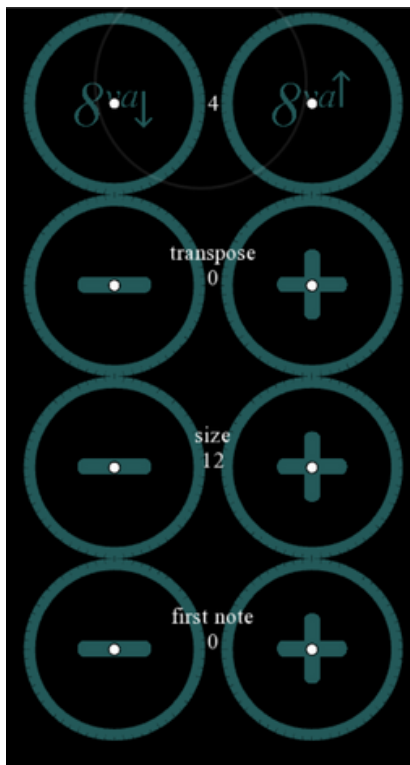

Dessa knappar höjer eller sänker ljudet en oktav.
Det gör att tonerna blir högre eller lägre men att du
inte ändrar tonart. Färgerna på tårtbitarna i Eyeharp
kommer heller inte att ändras.

Dessa knappar används för att transponera. Då
ändras tonarten. När du ändrar tonart i Eyeharp så
ändras färgerna på tårtbitarna i Eyeharp.

Dessa knappar ökar eller minskar antalet tårtbitar i
Eyeharp.


Dessa knappar ändrar vilken ton som kommer
närmast öppningen i Eyeharps cirkel.



Den högra menyn ser ut så här:

Här finns olika skalor och ackord som man kan prova.

Utgångspunkten är major (dur).

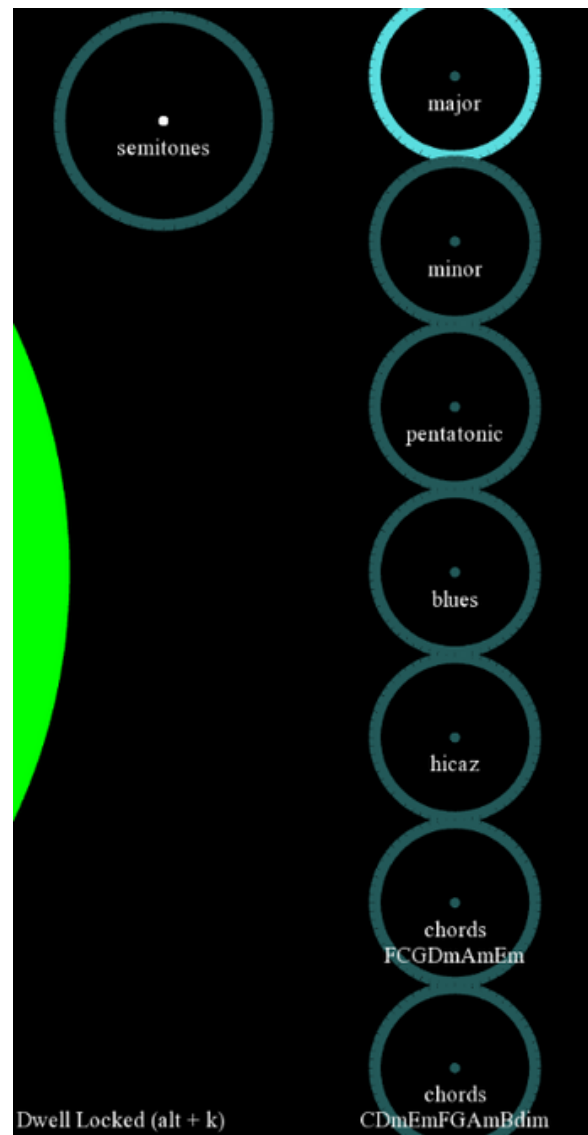

Frågor om detta dokument?

Info@lyssnatillmittoga.se

Frågor eller support kring Eyeharp kan även ställas direkt till Eyeharp: *(engelska)*
contact@eyeharp.org

